



Dermovitamina

RAGADI



GEL MANI-PIEDI

Filmante protettivo

- FAVORISCE LA GUARIGIONE
- RIDUCE RAPIDAMENTE IL DOLORE

Contro ragadi e fissurazioni

- / EVITA LA RIAPERTURA
- / RESISTENTE ALL'ACQUA
- / AIUTA LA CICATRIZZAZIONE ENTRO 5 GIORNI

DERMOVITAMINA RAGADI GEL MANI-PIEDI è indicato nel trattamento di ragadi, screpolature, fissurazioni, spaccature dei piedi e delle mani e di piccoli tagli.

PROPRIETÀ

Grazie alla sua particolare tecnologia DERMOVITAMINA RAGADI GEL MANI-PIEDI, una volta applicato, si trasforma in un film elastico, trasparente, protettivo, resistente all'acqua, che si asciuga rapidamente. Il film ripara la ragade dalle aggressioni esterne, riduce rapidamente il dolore, favorisce la cicatrizzazione entro 5 giorni ed evita la riapertura della ferita.

DERMOVITAMINA RAGADI GEL MANI-PIEDI ha una formula particolare arricchita di:

- Vitamina E, antiossidante per eccellenza che favorisce la rigenerazione della pelle.
- Olio di ricino, ottimo emolliente ed elasticizzante dello strato protettivo.

È indicato anche per trattare piccole ragadi e fissurazioni del piede diabetico non avendo controindicazioni.

/ DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

ISTRUZIONI PER L'USO

- Pulire e asciugare la ferita, fino alla fine del sanguinamento.
- Applicare il prodotto con l'apposita spatola fino ad avvolgere e coprire uniformemente la ferita da trattare.
- Lasciare asciugare per qualche secondo.
- Ripetere l'applicazione più volte al giorno se necessario, fino alla completa guarigione della lesione.
- Per rimuovere la pellicola è sufficiente riapplicare una goccia di prodotto sul filmogel

già esistente, asportandolo con una salvietta.

- Richiudere accuratamente il flacone dopo l'uso.
- Non utilizzare il prodotto oltre i 6 mesi dopo l'apertura della confezione.

AVVERTENZE

- Non utilizzare nei bambini con meno di 6 anni.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare sulle lesioni localizzate, di piccole dimensioni.
- Appena applicato si può avvertire una lieve e momentanea sensazione di bruciore che scompare dopo pochi istanti.
- In caso di arrossamenti sospendere l'applicazione e consultare il proprio medico.
- Non ingerire.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.
- Facilmente infiammabile.
- Irritante per gli occhi.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fiamme o fonti di calore.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI

Non applicare su:

- Ferite emorragiche.
- Ferite infette.
- Scottature.
- Mucose (labbra, ano).
- Seno.
- Contorno occhi.
- Non utilizzare in caso di accertata sensibilità verso uno dei componenti.



Dermovitamina

COMPOSIZIONE

alcohol denat., castor oil, ethyl acetate, hydroxypropyl cellulose, isopropyl alcohol, ni-trocellulose, tocopheryl acetate.

LEGENDA



Non disperdere nell'ambiente



Non utilizzare se l'imballaggio non è integro



Leggere le istruzioni per l'uso



Non esporre al sole



Attenzione leggere attentamente le avvertenze



CONFEZIONE

Flacone da 7 ml e

Con spatola per facilitare l'applicazione

Foglietto: PAP 22 Carta - Raccolta carta

Per lo smaltimento verifica le disposizioni del tuo Comune

R04-1025 Rev. Ottobre 2025

DISPOSITIVO MEDICO



Pasquali S.r.l.

Via Dante, 7 - 20123 Milano
Italy - dermovitamina.it